

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕式血圧計AS01	HCM-AS01BTWH HCM-AS01WH	Clinical Test Report (臨床性能試験) Standards and methods : ISO 81060-2:2013	<p>■方法</p> <ul style="list-style-type: none">• 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。• 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をやわらかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。• 本体内部に水などが入らないようにしてください。• 汚れを落とすときには、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。• カフは洗濯できません。• カフをぬらさないでください。 <p>■耐用期間</p> <p>10,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方</p>	エレコムヘルスケア株式会社